

SOEPELE POLSBRACE **ACTIVITEIT** **CARP'ACTIV™**



BIJ DE BEWEGING VAN DE POLS



INDICATIES:

Wanneer u last heeft van het Carpaal tunnel syndroom (CPS), spier- en skeletaandoeningen of peesontstekingen aan de pols raden wij u aan om de soepele CARP'ACTIV™ te dragen zodat u uw dagelijkse activiteiten kan blijven uitoefenen.

CONTRA-INDICATIES:

De brace mag niet rechtstreeks in contact komen met een huidletsel.

VOORZORGEN BIJ GEBRUIK:

Niet aanbevolen bij langdurig typen. Niet in de buurt van een vlam of gloeiend voorwerp houden.

BIJZONDERE KENMERKEN:

De brace is ontworpen ter ondersteuning van de polsbewegingen en waarborgt de bewegingsvrijheid van de vingers. CARP'ACTIV™ beperkt de bruske bewegingen van de pols.

ERGONOMIE :

De soepele polsbrace werkt ondersteunend en biedt een optimaal comfort dankzij het technische weefsel en de specifieke vorm die de contouren van de hand volgt.

LEVENSDUUR:

De orthese heeft een lange levensduur (meerdere maanden) aangezien ze in het meegeleverde netje in de wasmachine gewassen kan worden.

SAMENSTELLING: 100% polyamide/elastaanweefsel.

De materialen werden beoordeeld op hun biocompatibiliteit volgens ISO-norm 10993-1. Indien er zich alsnog een probleem zou voordoen, stop dan onmiddellijk met het gebruik en breng MILLET Innovation op de hoogte. Het bedrijf MILLET Innovation kan niet aansprakelijk worden gesteld indien het product niet volgens de aanbevelingen van de fabrikant wordt gebruikt. De referentietaal is het Frans. Initiële CE-markering: 2018.



Wasbaar in de wasmachine à 30°C
Geen bleekmiddel gebruiken.



Niet strijken of stomen.
Niet in de droogkast.



Geen chemische reiniging.
LOT Zie verpakking.

Product ontwikkeld door MILLET Innovation.



MILLET Innovation ZA Champgrand
26270 Lorio/Drôme - FRANKRIJK



MILLET
INNOVATION

www.epitact.nl