


CORRIGERENDE ORTHESE VOOR 'S NACHTS HALLUX VALGUS "KNOBBEL"



HOE WERKT DE CORRIGERENDE ORTHESE?

De thermovormbare versterking corrigeert de positie van de grote teen. Op die manier wordt de gewrichtspijn 's nachts verlicht.

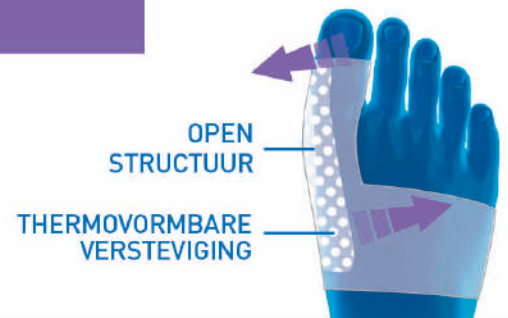

INDICATIES:

Door geregeld de corrigerende EPITACT® orthese voor 's nachts te dragen wordt de hallux valgus gecorrigeerd en groeit hij niet verder. De orthese helpt 's nachts gewrichtspijn en pijn door aanraking te verlichten.

CONTRA-INDICATIES:

De orthese mag niet worden gebruikt indien de grote teen niet meer zijdelings heen en weer kan worden bewogen. Niet gebruiken op een beschadigde huid. Niet gebruiken in geval van diabetes en/of arteritis, zenuwaandoeningen aan de onderste ledematen of zweren.

BIJZONDERE KENMERKEN:

De orthese is thermovormbaar (op maat). De orthese wordt soepel zodra deze volledig is ondergedompeld in warm water. Plaats de spreider (ingesloten) zodra u de orthese heeft aangetrokken. Op die manier neemt de orthese de vorm van uw voet aan en corrigeert daarbij licht uw grote teen. De orthese verhardt en wordt opnieuw stevig in enkele minuten. Op die manier beschikt u over een comfortabele orthese op maat, zodat u

er tijdens het slapen geen last van heeft. Omdat de orthese meermaals thermohervormd kan worden, is deze steeds aanpasbaar.

LEVENSDUUR:

Herbruikbaar gedurende enkele maanden (wasbaar in de machine).

SAMENSTELLING: 52% thermovormbaar plastic, 28% polyamide/elasthaan, 20% siliconen.

De materialen werden beoordeeld op hun biocompatibiliteit volgens ISO-norm 10993-1. Indien er zich alsnog een probleem zou voordoen, stop dan onmiddellijk met het gebruik en breng MILLET Innovation op de hoogte. Het bedrijf MILLET Innovation kan niet aansprakelijk worden gesteld indien het product niet volgens de aanbevelingen van de fabrikant wordt gebruikt.

De referentietaal is het Frans. Initiële CE-markering: 2019.




Machiine wasbaar op 30 °C.




Niet strijken, geen stoom.




Niet stomen.

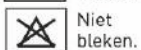

Niet bleken.

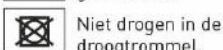

Niet drogen in de droogtrommel.

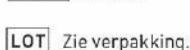

LOT Zie verpakking.

Product ontwikkeld van MILLET Innovatie - onderzoek.

MILLET Innovation ZA Champgrand
26270 Lorio/Drôme - FRANCE

MILLET
INNOVATION

www.epitact.nl