



PHYSIOstrap™ MEDICAL

INDICATIES: Door de PHYSIOstrap™ te dragen verlicht u de pijn aan uw knie en helpt u deze te ondersteunen (bij artrose, knieaandoeningen, zwakke gewrichtsbanden,...). Hij zorgt voor een gevoel van stabiliteit waardoor u uw dagelijkse activiteiten zonder hinder opnieuw kunt oppakken of voortzetten zoals bijv. lopen en fietsen.

CONTRA-INDICATIES: Om te vermijden dat de bloedcirculatie wordt belemmerd mag u de PHYSIOstrap™ niet gebruiken bij arteritis (slagaderontsteking), ernstige spataders, (lymfatisch/veneus) flebitis of oedeem in de benen en/of dijen. Niet gebruiken op huidletsels.

VOORZORGSMAATREGELEN BIJ GEBRUIK:

- De PHYSIOstrap™ wassen vóór het eerste gebruik.

De PHYSIOstrap™ is ontworpen voor dynamisch gebruik: **HET WORDT AFGERADEN DE PHYSIOSTRAP TE LANG TE DRAGEN IN EEN ZITTENDE OF LIGGENDE HOUDING.** Bij een zittende houding, het been met de strap niet verder buigen dan een hoek van 90°.



- Bij een gevoel van pijn, oedeem, ongemak of elke andere abnormale reactie moet men het gebruik van het product stopzetten en een arts raadplegen.

GBRUIKSAANWIJZING: Geen hydraterende cosmetica aanbrengen voordat u de PHYSIOstrap™ gebruikt.

BELANGRIJK! Om ervoor te zorgen dat de PHYSIOstrap™ perfect blijft zitten is het heel belangrijk na elk gebruik de elastische siliconen band schoon te maken met water en zeep.

ONDERHOUD: Wassen in de machine op 30°C of met de hand met water en zeep (niet schrobben). In een open ruimte laten drogen. Niet strijken.


SAMENSTELLING: 71% textiel (Polyamide, Elastaan), 29% siliconen

www.epitact.nl



AANBRENGEN:

- Vouw de elastische randen van de PHYSIOstrap™ naar buiten.
- Breng uw handen in de PHYSIOstrap™ en positioneer de knieschijf in het midden van de knieschijfing.
- Vouw de elastische randen van de PHYSIOstrap™ terug.
- Pas de positionering van de PHYSIOstrap™ staand aan, **zorg er voor dat de knieschijfing op de juist plaats gepositioneerd is.**

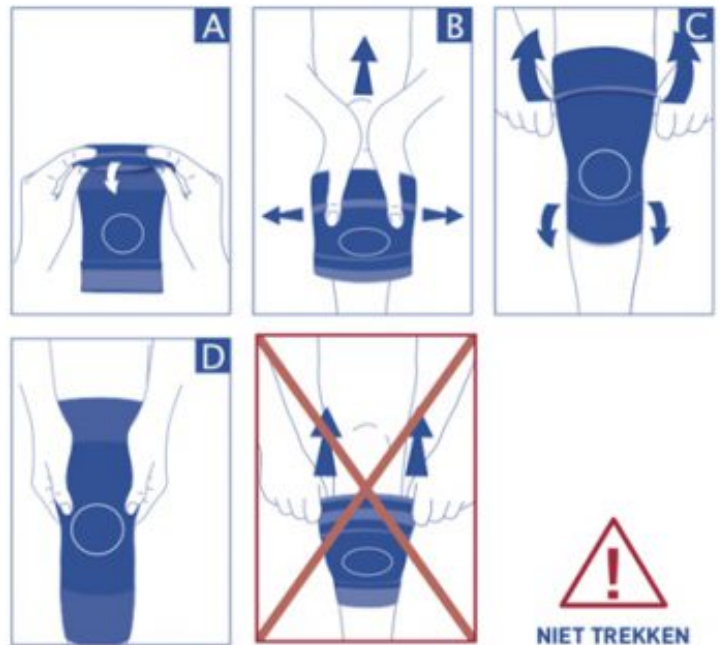

De materialen werden onderzocht op hun biocompatibiliteit, in overeenstemming met de ISO 10 993-1 norm met betrekking tot producten die met de huid in contact komen. Mocht er zich toch een probleem voordoen, dan moet het gebruik onmiddellijk worden stopgezet en moet het bedrijf MILLET Innovation op de hoogte worden gebracht.

De vennootschap MILLET Innovation wijst elke aansprakelijkheid af in geval van een gebruik dat niet aansluit bij de aanbevelingen van de fabrikant. De Franse versie geldt als referentietekst. Initiele CE-markering: 2016.

Machine wasbaar op 30°C.	Niet strijken, geen stoom.	Geen droogkuis.
Niet bleken.	Niet drogen in de droogtrommel.	LOT Zie verpakking.

MILLET Innovation
ZA Champgrand 26270 Lorient/Drôme - FRANCE
Product van MILLET Innovatie-onderzoek

