

PHYSIOstrap[™] SPORT

INDICATIES: Het dragen van de EPITHELIUMFLEX[®] PHYSIOstrap[™] Sport helpt knieschijfaandoeningen (patellofemorale pijnsyndroom, instabiliteit van de knieschijf, patellatendinopathie...) te verlichten. Bij een knieblesure die leidt tot complicaties (kwetsbare kniebanden, artrose...), draagt de PHYSIOstrap[™] Sport bij tot de stabiliteit van het gewricht bij het hervatten van sportactiviteiten.

CONTRA-INDICATIES: Om te vermijden dat de bloedcirculatie wordt belemmerd mag u de PHYSIOstrap[™] Sport niet gebruiken bij arteritis (slagaderontsteking), ernstige spataders, (lymfatisch/veneus) flebitis of oedeem in de benen en/of dijen. Niet gebruiken op huidletsels.

VOORZORGSMAATREGELEN BIJ GEBRUIK:

- Om elk risico op irritatie veroorzaakt door de elastische siliconen band te vermijden, mag de PHYSIOstrap[™] Sport niet gedragen worden wanneer u niet actief beweegt. Bijvoorbeeld tijdens slapen, liggen, zitten en of auto, bus of vliegvlucht. Trek de PHYSIOstrap[™] Sport pas aan net vóór u uw sportactiviteit start zodat deze enkel tijdens de beweging/activiteit wordt gedragen.
- Indien u compressietubes van het type "Booster" draagt ter hoogte van de kuiten, plaats dan de onderste elastische band van de PHYSIOstrap[™] Sport over de tube.
- Plaats de PHYSIOstrap[™] Sport op het bovenbeen zonder deze uit te rekken.

PASVORM:

- Geen hydraterende producten aanbrengen vóór het gebruik van de kniebeschermer zodat deze goed blijft zitten.
- Indien u problemen ervaart m.b.t. het op zijn plaats houden van de kniebeschermer in extreme omstandigheden (sporten met snelle acceleratie en vertraging, races met grote hoogteverschillen of lange afstanden, hoge temperaturen) wordt het dragen van een korte broek over de PHYSIOstrap[™] Sport aanbevolen.

BIJZONDERE EIGENSCHAP: De PHYSIOstrap[™] Sport heeft een dynamische werking zonder de beweging te belemmeren. Deze mag dus ook preventief gebruikt worden omdat de spiermassa behouden blijft.

ERGONOMIE: De EPITHELIUMFLEX[®] PHYSIOstrap[™] Sport, met een maximum aan technologie in minder dan 60g, is speciaal voor sportieve activiteiten ontwikkeld. De EPITHELIUMFLEX[®] PHYSIOstrap[™] Sport kan zowel aan de rechter- als aan de linker knie gedragen worden. Glijdt niet af en veroorzaakt geen irritatie aan de knie (knieholte). Bovendien is de PHYSIOstrap[™] Sport ultradun zodat deze onder alle type kleding kan worden gedragen.


BELANGRIJK! Om ervoor te zorgen dat de PHYSIOstrap[™] Sport perfect blijft zitten is het heel belangrijk na elk gebruik de elastische siliconen banden schoon te maken met water en zeep.

ONDERHOUD: Wassen in de machine op 30°C of met de hand met water en zeep (niet schrobben). In een open ruimte laten drogen. Niet strijken.

SAMENSTELLING: 70% polyamide/elasthaan, 30% siliconen.

■ AANBRENGEN:

- Vouw de elastische banden van de PHYSIOstrap[™] Sport naar buiten.
- Breng uw handen in de PHYSIOstrap[™] Sport en positioneer de knieschijf op de daartoe voorziene plaats in het midden van de knieschijf.
- Vouw de elastische banden weer terug zonder de PHYSIOstrap[™] Sport op uw been aan te spannen.
- Pas de positionering van de PHYSIOstrap[™] Sport stand aan, zorg er voor dat de knieschijf op de juist plaats gepositioneerd is.

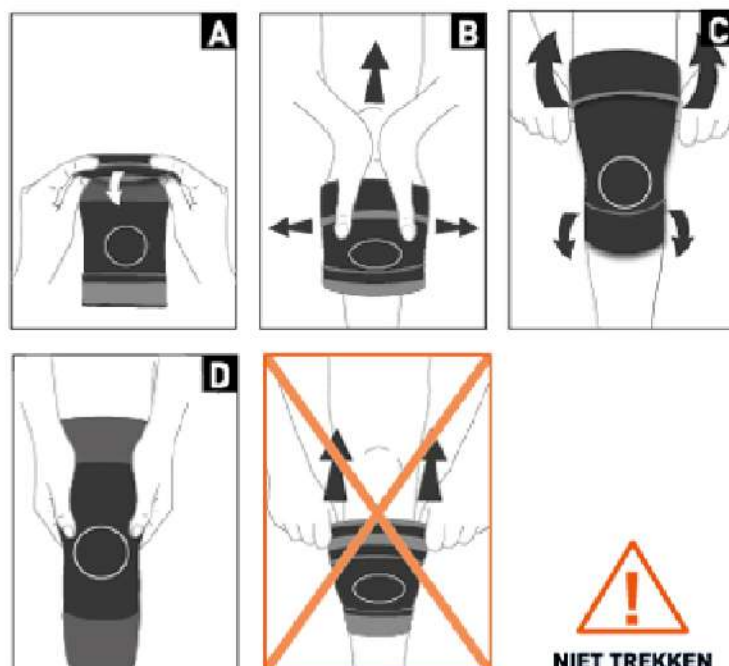

NIET TREKKEN

De materialen werden onderworpen aan alle wettelijk verplichte tests opgelegd door de ISO 10 933-1 norm betreffende producten die in contact komen met de huid. Indien een probleem mocht voordoen, gelieve het gebruik ervan onmiddellijk te stoppen en het bedrijf MILLET Innovation hiervan verwittigen.

In geval van pijn, oedeem, ongemak of elke andere afwijkende reactie, stop het gebruik van het product en raadpleeg een arts.

Het bedrijf MILLET kan niet aansprakelijk worden gesteld in geval van gebruik dat niet in overeenstemming is met de aanbevelingen van de fabrikant. De referentietaal is Frans. Initieel CE-label: 2014.

- | | | |
|--------------------------|---------------------------------|---------------------|
| Machine wasbaar op 30°C. | Niet strijken, geen stoom. | Geen droogkuis. |
| Niet bleken. | Niet drogen in de droogtrommel. | LOT Zie verpakking. |