

HALLUX VALGUS BESCHERMER met EPITHELIUM 26®

INDICATIES:

Voorkomen pijn ten gevolge van druk of wrijving op de hallus valgus (ook wel eeltknobbel genoemd).

EIGENSCHAPPEN

- Epithelium 26® is een door podologen gepatenteerde siliconengel waarvan de eigenschappen voor het verdelen van druk erg lijken op die van de onderhuidse weefsellaag.
- De aanwezigheid van Epithelium 26® in een dunne laag op de "eeltknobbel" zorgt ervoor dat deze bescherming doeltreffend de pijn vermindert, zonder dat extra druk wordt uitgeoefend.

Deze modules zijn een eenvoudige bescherming die de eeltknobbels niet kunnen corrigeren.

GEBRUIKSADVIES

- De bescherming moet op de huid gedragen worden, om de linker of de rechtervoet.
- Glijd de voet in de bescherming met de grote teen in het buisvormige gedeelte. De module Epithelium 26® gel moet zich tegen de hallux valgus bevinden.
- Voor een optimale bevestiging niet met blote voeten dragen maar met een kous, panty of sok er over heen. Deze moeten groot genoeg zijn, zodat de voet niet wordt samengedrukt.

ONDERHOUD

- In de machine wassen op 30°C, in het bijbehorende wasnet of met de hand (zonder wrijven).
- Aan de lucht laten drogen. Niet strijken.

CONTRA-INDICATIES:

- Niet gebruiken op een onbeschermd wond.
- Bij personen die lijden aan arteritis, diabetes, een polyneuropathie of een neuropathie van de onderste ledematen of spataderen: gebruik het product nooit op een wond, houd de voet in de gaten tijdens het gebruik en vraag altijd advies aan uw arts of een podoloog. De zoom die zich tussen de 1e en de 2e teen bevindt kan wrijving veroorzaken. Het wordt dus afgeraden aan diabetici met een neuropathie om dit te gebruiken.

SAMENSTELLING: 61% polyamide / elastaanstof, 39% siliconen.

De materialen werden onderworpen aan alle wettelijk verplichte tests opgelegd door de ISO 10 933-1 norm betreffende producten die in contact komen met de huid. Indien een probleem mocht voordoen, gelieve het gebruik ervan onmiddellijk te stoppen en het bedrijf MILLET Innovation hiervan verwittigen. MILLET Innovation kan niet aansprakelijk worden gesteld indien het gebruiksadvies van de fabrikant niet wordt wgerespecteerd. De referentietaal is Frans. Initieel CE-label: 2001.



Machine wasbaar op 30°C.



Niet strijken, geen stoom



Niet stomen.



Niet bleken.



Niet drogen in de droogtrommel.



Zie verpakking.

Product ontwikkeld van MILLET Innovatie - onderzoek.



MILLET Innovation ZA Champgrand
26270 Lorio/Drôme - FRANCE

**MILLET
INNOVATION**

www.epitact.nl

N19481-NL-A
03/2018