

HIELTJES met Physio'Choc™

INDICATIES

Voorkomen en verlichten gewrichtspijn en rugpijn veroorzaakt door de schokgolf die bij elke stap door het lichaam gaat. Verlicht pijn in verband met het hielspoor.

CONTRA-INDICATIES

- Bij een allergische reactie stopt u onmiddellijk met het gebruik van dit product en informeert u de onderneming MILLET Innovation.
- Niet gebruiken op een huidletsel.
- Bij personen die lijden aan arteritis, diabetes, een polyneuropathie of een neuropathie van de onderste ledematen of spataderen: gebruik het product nooit op een wond, houd de voet in de gaten tijdens het gebruik en vraag altijd advies aan uw arts of podoloog.

VOORZORGSMAATREGELEN BIJ GEBRUIK

- De hieltes moeten met sokken, kousen of een panty gedragen worden.
- Voor het 1e gebruik moet u het beschermlaagje op het dubbelzijdige hechtband verwijderen. Plaats de hieltes vervolgens in de schoenen.
- Als de hieltes te breed zijn voor de schoen, kunnen ze eenvoudig met een schaar op de gewenste maat worden afgeknipt.

FUNCTIONALITEIT

- Physio'Choc™ is een sterke schokbreker die door podologen wordt erkend. De hieltes die met dit materiaal worden gemaakt zorgen voor een verspreiding van de energie die vrijkomt bij de schok tussen de voet en de grond: gewrichtspijn en rugpijn worden zo beperkt.
- Bovendien verlichten de inleghakken de druk op het peesvlies door de verhoging van 5 mm en zorgen voor een aangenaam comfort bij een hielspoor.

ONDERHOUD

- De hieltes kunnen niet gewassen worden.

SAMENSTELLING: 76% Physio'Choc™ (Elastomeer), 24% silicone.

De materialen werden onderworpen aan alle wettelijk verplichte tests opgelegd door de ISO 10 933-1 norm betreffende producten die in contact komen met de huid. Indien een probleem mocht voordoen, gelieve het gebruik ervan onmiddellijk te stoppen en het bedrijf MILLET Innovation hiervan verwittigen. MILLET Innovation kan niet aansprakelijk worden gesteld indien het gebruikadvies van de fabrikant niet wordt gerespecteerd. De referentietaal is Frans. Initieel CE-label: 2005.



Kunnen niet gewassen worden



Niet strijken, geen stoom.



Geen droogkuis.



Niet bleken.



Niet drogen in de droogtrommel.



LOT Zie verpakking.