

KUSSENTJES DUBBELE BESCHERMING met Epithelium 26®

INDICATIE

Voorkomen en verlichten van pijn onder de voorvoet (eelt, warm gevoel, lang staan ...) en pijn veroorzaakt door wrijving op de Hallux Valgus.

CONTRA-INDICATIES

- Niet gebruiken op een huidletsel.
- Bij personen die lijden aan arteritis, diabetes, een polyneuropathie of een neuropathie van de onderste ledematen of spataderen: gebruik het product nooit op een wond, houd de voet in de gaten tijdens het gebruik en vraag altijd advies aan uw arts of een podoloog. Het lipje kan tussen de tenen wrijven. Het wordt dus aan diabetici met een neuropathie afgeraden om dit te gebruiken.ng.

VOORZORGSMAATREGELEN BIJ GEBRUIK

- Wassen vóór 1ste gebruik.
- Op de huid dragen.
- Het bedrukte gedeelte van de stof moet in contact zijn met de voetzool. Niet omdraaien.
- Glijd de voet in het kussentjes, plaats het bevestigingslipje tussen de grote teen en de tweede teen.
- Voor een optimale bevestiging niet met blote voeten dragen maar met een kous, panty of sokken er over heen. Deze moeten groot genoeg zijn, zodat de voet niet wordt samengedrukt.

FUNCTIONALITEIT

- Epithelium 26® is een door podologen gepatenteerde “vervanging van de vetkussentjes onder de voet». Door zijn mechanische eigenschappen vervangt deze siliconengel inderdaad de slecht functionerende vetkussentjes die pijn veroorzaken: hij verdeelt het gewicht van het lichaam perfect over het hele steunvlak.
- De aanwezigheid van Epithelium 26® onder de voetzool en op eeltknobbels (in de vorm van een dunne module) zorgt ervoor dat de Kussentjes met dubbele bescherming doeltreffend de pijn verminderen zonder dat extra druk wordt uitgeoefend.

De Kussentjes met dubbele bescherming zijn een eenvoudige bescherming die de eeltknobbels niet kunnen corrigeren.

ONDERHOUD

- In de machine wassen op 30°C, in het bijbehorende wasnet of op de hand (zonder wrijven).
- Aan de lucht laten drogen. Niet strijken.

SAMENSTELLINGU: 85% siliconen, 15% polyamide/elasthaan weefsel.

De materialen werden onderworpen aan alle wettelijk verplichte tests opgelegd door de ISO 10 933-1 norm betreffende producten die in contact komen met de huid. Indien een probleem mocht voordoen, gelieve het gebruik ervan onmiddellijk te stoppen en het bedrijf MILLET Innovation hiervan verwittigen.

MILLET Innovation kan niet aansprakelijk worden gesteld indien het gebruikadvies van de fabrikant niet wordt gerespecteerd. De referentietaal is Frans. Initieel CE-label: 2001.



Machine wasbaar op 30°C.



Niet strijken, geen stoom.



Geen droogkuis.



Niet bleken.



Niet drogen in de droogtrommel.



Zie verpakking.