

DIGITUBES® met Epithelium™

INDICATIE

Beschermen tenen of vingers, voorkomen de vorming van likdoorns, blaren en verlichten pijn...

CONTRA-INDICATIES

- Niet gebruiken op een huidletsel.
- Personen die lijden aan arteritis, diabetes, polyneuropathie, neuropathie van de onderste ledematen of zweren: vraag raad aan uw arts of podoloog, vervolgens uw voet opvolgen gedurende het gebruik.

VOORZORGSMAATREGELEN BIJ GEBRUIK

- Knip een Digitube® met een goede schaar op de gewenste lengte.
- Verwijder het beschermlaagje op de gel.
- Draai de Digitube® om een manchet te vormen en plaats deze op de teen, zodat de Epithelium™ in contact staan met de te beschermen zone.

FUNCTIONALITEIT

- Epithelium™ is een siliconengel waarvan de eigenschappen voor het verdelen van druk erg lijken op die van de onderhuidse weefsellaag. Door de aanwezigheid van dit materiaal in de Digitubes® wordt de vorming van likdoorns voorkomen en pijn verlicht als de eeltplekken al gevormd zijn.
- Door hun kleine formaat kunnen de Digitubes® gelijktijdig op naast elkaar gelegen tenen worden gebruikt.

ONDERHOUD

- Op de hand wassen, niet wrijven.
- Aan de lucht laten drogen. Niet strijken.

SAMENSTELLING: 73% siliconen, 27% polyamide/elasthaan weefsel.

De materialen werden onderworpen aan alle wettelijk verplichte tests opgelegd door de ISO 10 933-1 norm betreffende producten die in contact komen met de huid. Indien een probleem mocht voordoen, gelieve het gebruik ervan onmiddellijk te stoppen en het bedrijf MILLET Innovation hiervan verwittigen.

MILLET Innovation kan niet aansprakelijk worden gesteld indien het gebruikadvies van de fabrikant niet wordt gerespecteerd. De referentietaal is Frans. Initieel CE-label: 2001.



Alleen handwas.



Niet strijken,
geen stoom.



Geen droogkuis.



Niet bleken.



Niet drogen in de
droogtrommel.



LOT Zie verpakking.