

BESCHERMING TEGEN KLOVEN met Epithelium™

INDICATIES

Gekloofde, gebarsten, pijnlijke hielen doelmatig beschermen, de pijn verlichten en het uiterlijk van de hiel verbeteren.

EIGENSCHAPPEN

De eigenschappen van deze hielbeschermers zijn het verdelen van de druk en de occlusiviteit van de Epithelium™ gel: ze verlichten de pijn bij het lopen en zorgen voor een significante verbetering van het uiterlijk van de hielen in slechts 3 weken.

- Overdag dragen: verlichting bij het lopen + efficiënte hydratatie
- 's Nachts dragen: efficiënte hydratatie

GEBRUIKSAANWIJZING

Bij kloven en pijnlijke hielen wordt geadviseerd de beschermers overdag te dragen. Bij barstjes en lelijke hielen volstaat het de beschermers 's nachts te dragen.

- Gebruik de beschermers op een schone en droge huid.
- Schuif de voet in de 2 banden.
- Plaats dan de bovenste band om de enkel.
- Plaats het deel met de gel rondom de hiel.
- Bedek de hielbeschermer met kous, sok of panty bij gebruik overdag.
- De 2e beschermer aanbrengen op de 2e voet zoals hierboven beschreven.

Breng de hielbeschermers dagelijks aan voor herstel van de huid en derhalve aanzienlijke verbetering van het uiterlijk van de huid (kloven, barsten en ander oppervlakkig huidletsel verdwijnen).

ONDERHOUD

- Wasbaar in de machine op 40°C in een wasnetje, of met de hand zonder te wrijven.
- Aan de lucht laten drogen.

CONTRA-INDICATIES

- Het product is onderworpen aan alle test voor de norm ISO 10993-1. Indien zich desondanks een allergische reactie voordoet, het gebruik van het staafje onmiddellijk staken en MILLET Innovation SA inlichten.
- Voor personen met aderontsteking, diabetes, polyneuropathie, neuropathie van de onderste ledematen of open been: het product nooit gebruiken op een wond, goed op de voet letten tijdens het gebruik en bij twijfel uw arts of podoloog om advies vragen.

MILLET Innovation SA is niet aansprakelijk bij gebruik niet overeenkomstig de aanbevelingen van de fabrikant.



LOT zie verpakking

