

## TEENSCHIEDERS met EPITHELIUM™

### INDICATIES

De teenscheiders met EPITHELIUM™ zijn bedoeld om 2 tenen van elkaar te scheiden die in overdreven mate tegen elkaar drukken en wrijven.

### CONTRA-INDICATIES

- Niet gebruiken op een huidletsel.
- Personen die lijden aan arteritis, diabetes, polyneuropathie, neuropathie van de onderste ledematen of zweren: vraag raad aan uw arts of podoloog, vervolgens uw voet opvolgen gedurende het gebruik.

### VOORZORGSMAATREGELEN BIJ GEBRUIK

- Wassen vóór 1<sup>ste</sup> gebruik.
- Plaats 1 teenscheider tussen de tenen. Zorg ervoor dat het breedste gedeelte zich onder de voet bevindt en het vlakke gedeelte tegen de likdoorn.  
Opmerking : Voor een grotere ruimte tussen twee tenen:
  - Plaats twee teenscheiders tegen elkaar.
  - Plaats de verkegen samenstelling tussen de tenen.
- Nadat een likdoorn door de voetverzorger verwijderd is, wordt een teenscheider tussen de tenen geplaatst.

### FUNCTIONALITEIT

- De teenscheider maakt het mogelijk om de tenen een paar millimeter van elkaar te scheiden. De teenspreiders werden vervaardigd uit EPITHELIUM™, een stof met algemeen erkende eigenschappen om de druk te verspreiden en wrijvingen te voorkomen.
- Deze soepele stof en de specifieke, op de voet afgestemde vorm van de teenscheider zorgt onmiddellijk voor een comfortabel gevoel.

### ONDERHOUD

U kunt het verband met water en zeep wassen. Niet wrijven en in de open lucht laten drogen.

**SAMENSTELLING:** 100% siliconen.

De materialen werden onderworpen aan alle wettelijk verplichte tests opgelegd door de ISO 10 933-1 norm betreffende producten die in contact komen met de huid. Indien een probleem mocht voordoen, gelieve het gebruik ervan onmiddellijk te stoppen en het bedrijf MILLET Innovation hiervan verwittigen. MILLET Innovation kan niet aansprakelijk worden gesteld indien het gebruik-sadvies van de fabrikant niet wordt gerespecteerd. De referentietaal is Frans. Initieel CE-label: 2004.



Alleen handwas.



Niet strijken,  
geen stoom.



Geen droogkuis.



Niet bleken.



Niet drogen in de  
droogtrommel.



LOT Zie verpakking.