



DISCRETE KUSSENTJES met Epithelium 26®

INDICATIES

Veroudering van het voetpolster, eeltplekken, reumatische pijnen, algodystrofie, langdurige staande houding, sporten waarbij de voorvoet wordt belast.

CONTRA-INDICATIES

- Niet gebruiken op een huidletsel.
- Bij personen die lijden aan artritis, diabetes, een polyneuropathie of een neuropathie van de onderste ledematen of spataderen: gebruik het product nooit op een wond, houd de voet in de gaten tijdens het gebruik en vraag altijd advies aan uw arts of podoloog.

VOORZORGSMAATREGELEN BIJ GEBRUIK

- Zorg voor rechtstreeks contact tussen huid en zool voor opti-maal comfort.
- Bepaal van te voren de rechter- en linkervoet. Ga hiervoor voor de twee zolen staan: de bedrukte stof met het opschrift Epithelium 26® moet met de goede zijde naar boven wijzen. Leg de zolen naast elkaar en controleer of deze goed liggen (de rechterzool rechts en de linker links); aan de onderkant moet zich een driehoekige ruimte vormen (zie hiernaast). Als dit niet klopt, verwissel dan de zolen.
- Verwijder de dubbelzijdige, zelfklevende beschermingsfolie van de achterkant van de zolen.
- Plaats de zolen in uw schoenen, met het breedste deel naar voren. De zolen liggen dan een beetje dwars, zoals aangegeven op de foto hiernaast.

ONDERHOUD

De zolen kunnen in de wasmachine op 30°C worden gewassen. Tevens kan de zelfklevende folie worden vervangen. Laat daartoe de zolen vanzelf drogen en vervang de zelfklevende folie.

SAMENSTELLING: 81% siliconen, 19% polyamide/elasthaan weefsel.

De materialen werden onderworpen aan alle wettelijk verplichte tests opgelegd door de ISO 10 933-1 norm betreffende producten die in contact komen met de huid. Indien een probleem mocht voordoen, gelieve het gebruik ervan onmiddellijk te stoppen en het bedrijf MILLET Innovation hiervan verwittigen.

MILLET Innovation kan niet aansprakelijk worden gesteld indien het gebruikadvies van de fabrikant niet wordt gerespecteerd. De referentietaal is Frans. Initieel CE-label: 2005.



Machine wasbaar op 30°C.



Niet strijken, geen stoom.



Geen droogkuis.



Niet bleken.



Niet drogen in de droogtrommel.



Zie verpakking.