

# EELTBESCHERMERS met EPITHELIUM™ Activ

## INDICATIES

Beschermt de huid en verlicht de pijn die door eeltknobbels en eeltplekken onder de middelvoet wordt veroorzaakt.

## CONTRA-INDICATIES

- Niet gebruiken op een huidletsel.
- Bij allergische reacties of hevige irritaties moet u ophouden met de behandeling.

## VOORZORGSMAATREGELEN BIJ GEBRUIK

- Wassen vóór 1<sup>ste</sup> gebruik.
- Het verband moet op een schone en droge huid worden aangebracht.
- Haal een verband uit het gemetalliseerd zakje.
  - Verwijder voorzichtig het beschermplaatje dat het klevend oppervlak bedekt.
  - Breng dit klevend oppervlak aan op de huid, waarbij u de eeltplek geheel bedekt.
  - Druk lichtjes op het verband zodat het goed aan de voet kleeft.
  - Trek voorzichtig uw sokken, kousen of panty's aan.
  - Laat het product overdag zitten.
  - Verwijder 's avonds het verband, leg het op het daarvoor bestemd opbergetui en stop het in het gemetalliseerd zakje tot de volgende morgen.

**Voor een optimale doeltreffendheid raden wij u aan het verband dagelijks aan te brengen tot de eeltknobbel verdwenen is.**

## FUNCTIONALITEIT

- Dit zelfklevend verband verlicht de pijn dankzij de **Activ EPITHELIUM™-gel die de druk verdeelt: direct na het aanbrengen loopt u al makkelijker.**
- Dit verband is zeer doeltreffend ondanks zijn **geringe dikte** en kan zonder hinder in alle soorten schoenen (stad, sport, in huis...) worden gebruikt.

**Dit verband werd op diabetici getest en goedgekeurd.**

## ONDERHOUD

U kunt het verband met water en zeep wassen. Niet wrijven en in de open lucht laten drogen.

**SAMENSTELLING:** 84% siliconen, 16% polyamide/elasthaan weefsel.

De materialen werden onderworpen aan alle wettelijk verplichte tests opgelegd door de ISO 10 933-1 norm betreffende producten die in contact komen met de huid. Indien een probleem mocht voordoen, gelieve het gebruik ervan onmiddellijk te stoppen en het bedrijf MILLET Innovation hiervan verwittigen. MILLET Innovation kan niet aansprakelijk worden gesteld indien het gebruik-sadvies van de fabrikant niet wordt gerespecteerd. De referentietaal is Frans. Initieel CE-label: 2006.



Alleen handwas.



Niet strijken,  
geen stoom.



Geen droogkuis.



Niet bleken.



Niet drogen in de  
droogtrommel.



**LOT** Zie verpakking.