

HALLUX VALGUSBESHERMERS met Activ Epithelium™

INDICATIES

Beschermt de hallux valgus (knobbel). Door bovenmatige wrijvingen te beperken, wordt de pijn op een efficiënte manier verlicht.

CONTRA-INDICATIES

- Niet gebruiken op een huidletsel.
- Bij allergische reacties of hevige irritaties moet u ophouden met de behandeling.

VOORZORGSMATREGELEN BIJ GEBRUIK

Het verband moet op een schone en droge huid worden aangebracht.

- Haal een verband uit het gemetalliseerd zakje.
- Verwijder voorzichtig het beschermlaagje dat het klevend oppervlak bedekt.
- Breng dit klevend oppervlak aan op de huid, waarbij u de zone met de hallux valgus geheel bedekt.
- Druk lichtjes op het verband zodat het goed aan de voet kleeft.
- Trek voorzichtig uw sokken, kousen of panty's aan.
- Laat het product overdag zitten.
- Verwijder 's avonds het verband, leg het op het daarvoor bestemd opbergetui en stop het in het gemetalliseerd zakje tot de volgende morgen.

Wij raden u aan het verband dagelijks aan te brengen voor een optimale doeltreffendheid.

FUNCTIONALITEIT

- Dit zelfklevend verband brengt verlichting dankzij de **Activ d'Epithelium™-gel die de druk verdeelt en de wrijvingen die pijn veroorzaken beperkt.**
- Dit verband is zeer doeltreffend ondanks zijn **geringe dikte** en kan zonder extra druk te veroorzaken in alle soorten schoenen (stad, sport, in huis...) worden gebruikt.

Dit verband werd op diabetici getest en goedgekeurd.

ONDERHOUD

U kunt het verband met water en zeep wassen. Niet wrijven en in de open lucht laten drogen.

SAMENSTELLING: 85% siliconen, 15% polyamide/elasthaan weefsel.

De materialen werden onderworpen aan alle wettelijk verplichte tests opgelegd door de ISO 10 933-1 norm betreffende producten die in contact komen met de huid. Indien een probleem mocht voordoen, gelieve het gebruik ervan onmiddellijk te stoppen en het bedrijf MILLET Innovation hiervan verwittigen.

MILLET Innovation kan niet aansprakelijk worden gesteld indien het gebruikadvies van de fabrikant niet wordt gerespecteerd. De referentietaal is Frans. Initieel CE-label: 2006.



Alleen handwas.



Niet strijken,
geen stoom.



Geen droogkuis.



Niet bleken.



Niet drogen in de
droogtrommel.



LOT Zie verpakking.