

BESCHERMING TEGEN BLAREN met actieve Epithelium™

INDICATIES

Beschermt de huid, voorkomt en geneest blaren, irritaties, branderigheid door wrijving...

CONTRA-INDICATIES

- Niet gebruiken op een huidletsel.
- Bij allergische reacties of hevige irritaties moet u ophouden met de behandeling.

VOORZORGSMaatregelen bij gebruik

Deze beschermers werken **preventief**. Ze zijn bijzonder geschikt wanneer de blaar reeds gevormd maar nog niet doorgestoken is. De beschermers moeten op een schone en droge huid worden aangebracht.

- Haal een beschermer uit het gemetalliseerd zakje.
- Verwijder voorzichtig het beschermplaatje dat het klevend oppervlak bedekt.
- Breng dit klevend oppervlak aan op de huid, waarbij u de te beschermen zone geheel bedekt.
- Druk lichtjes op de beschermer zodat hij goed kleeft.
- Leg de beschermer na gebruik op het daarvoor bestemd opbergetui en stop hem in het gemetalliseerd zakje totdat u hem de volgende keer gebruikt.

FUNCTIONALITEIT

- De actieve Epithelium™ is een zelfklevende gel die één geheel vormt met de huid en wrijvingen aan het huidoppervlak vermindert. Hij beschermt dus de opperhuid en brengt verlichting in reeds gevormde en niet doorgestoken blaren.
- Deze verplaatsbare beschermers voelen prettig aan. U kunt ze **pijnloos verwijderen**, zelfs op behaarde lichaamsdelen. U kunt ze op uw voeten gebruiken, in alle soorten schoenen (stad, sport, ...), maar ook op alle aan wrijving blootgestelde lichaamsdelen (bijvoorbeeld door naden veroorzaakte wrijvingen of irritaties die door huidcontacten ontstaan).

Deze beschermers worden speciaal aan diabetici aanbevolen.

ONDERHOUD

U kunt de beschermers met water en zeep wassen. Niet wrijven en in de open lucht laten drogen.

SAMENSTELLING: 71% siliconen, 29% polyamide/elasthaan weefsel.

De materialen werden onderworpen aan alle wettelijk verplichte tests opgelegd door de ISO 10 933-1 norm betreffende producten die in contact komen met de huid. Indien een probleem mocht voordoen, gelieve het gebruik ervan onmiddellijk te stoppen en het bedrijf MILLET Innovation hiervan verwittigen.

MILLET Innovation kan niet aansprakelijk worden gesteld indien het gebruikadvies van de fabrikant niet wordt gerespecteerd. De referentietaal is Frans. Initieel CE-label: 2006.



Alleen handwas.



Niet strijken,
geen stoom.



Geen droogkuis.



Niet bleken.



Niet drogen in de
droogtrommel.



LOT Zie verpakking.