

BLARENPLEISTERS EPITHELIUMTACT 01

FUNCTIONALITEIT:

De EPITHELIUMTACT01 pleisters bestaan uit een 1 mm dikke zelfklevende siliconengel, waarvan de viskeus-elastische eigenschappen die van de huid benaderen. De pleisters worden vóór het sporten aangebracht op de gevoelige zones van de voet, verdelen de druk en absorberen de wrijvingen door de energie in de gel te verspreiden. Zo wordt de vorming van blaren voorkomen. Het contact met de huid is heel aangenaam. De pleister kan pijnloos worden verwijderd, ook op behaarde zones.

GEBRUIKSAANWIJZING:

Deze pleisters moeten preventief worden gebruikt. Ze zijn ook perfect geschikt wanneer de blaar gevormd maar niet doorpikt is.

De pleisters moeten worden gebruikt op een schone en droge huid.

- Haal een pleister uit het gemetalliseerde zakje.
- Verwijder voorzichtig het bescherm laagje dat het klevende oppervlak bedekt.
- Breng dit klevende oppervlak aan op de huid en zorg er daarbij voor dat u de te beschermen zone goed bedekt.
- Druk lichtjes op de pleister, zodat hij perfect vastkleeft.
- Bedek de pleister met de steuntape om ervoor te zorgen dat de pleister goed blijft zitten (centreer de pleister, zodat er over de volledige omtrek 2 cm tape overblijft).
- Verwijder de steuntape na gebruik van de huid en maak de pleister voorzichtig los.
- Doe de pleister in het daartoe voorziene opbergdoosje en gemetalliseerde zakje tot het volgende gebruik.

ONDERHOUD:

De pleisters kunnen gemiddeld 4 tot 5 keer met water en zeep worden gewassen zonder hun kleefkracht te verliezen. Niet wrijven en vanzelf laten drogen.

CONTRA-INDICATIES:

- Het product werd onderworpen aan alle tests die worden voorgeschreven door ISO-norm 10993-1 met betrekking tot producten die in aanraking komen met de huid. Mocht u toch een reactie van de huid vaststellen, stop dan meteen met het hulpmiddel te gebruiken en breng MILLET Innovation op de hoogte.
- Niet gebruiken op een onbeschermd wond.
- Voor personen die aan artritis, diabetes, polyneuropathie, neuropathie van de onderste ledematen of open been lijden: gebruik het product nooit op een wond of een diabetische voetzweer, houd de voet in het oog tijdens het gebruik en vraag uw arts of podoloog om advies.

SAMENSTELLING:

- PLEISTER: 84 % silicone, 16 % weefsel van polyamide en elasthaan.
- STEUNTAPE: 100 % biocompatibel.

MILLET Innovation is niet aansprakelijk bij gebruik dat afwijkt van de aanbevelingen van de fabrikant.



Wasbaar met de hand.



Niet chloreren.



Niet strijken, geen stoom.



Niet drogen in de machine.



Niet chemisch reinigen.

HOEVEELHEID:
zie verpakking