

NEDERLANDS

ORTHESE HALLUX VALGUS EPITHELIUMFLEX® 02

FUNCTIE:


Dankzij de soepele orthese voor hallux valgus kan de grote teen anders wordt gericht, de pronatie wordt beperkt en de voortbeweging wordt geoptimaliseerd. De externe EPITHELIUMFLEX® ondersteuning zorgt er ook voor dat de druk op en de wrijving tegen de exostose («knobbel») worden geabsorbeerd. Ten slotte beperkt de compressieband voor de middenvoet het platter en breder worden van de voorvoet.

GEBRUIKSAANWIJZING:

- Ga eerst na of de grote teen nog zijwaarts kan worden bewogen. Is dat niet het geval, gebruik dit hulpmiddel dan niet.
- Gebruik dit product niet 's nachts.
- De orthese kan zowel aan de rechter- als aan de linkervoet worden gedragen.


AANBRENGEN:

- Stop de voorvoet in de compressieband.
- Stop vervolgens de grote teen in de daartoe voorziene plaats.
- Plaats het Epithelium™ kussentje (a) achter de knobbel (b). (Zie schema 1).

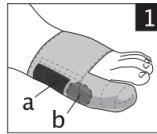

REGELING:

- Probeer bij het eerste gebruik de grote teen niet meteen volledig anders te richten.
- Richt tijdens de eerste 10 keer dat u het hulpmiddel gebruikt, de grote teen geleidelijk anders door het hulpmiddel naar achter te trekken. (Zie schema 2).

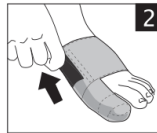

Het hulpmiddel kan dagelijks worden gedragen voor een optimale efficiëntie.

ONDERHOUD:

- Was in de machine op 40 °C of met de hand (zonder te schrobben).
- Laat vanzelf drogen. Niet strijken.

CONTRA-INDICATIES:

- Niet beweegbare grote teen.
- Het product werd onderworpen aan alle tests die worden voorgeschreven door ISO-norm 10993-1 met betrekking tot producten die in aanraking komen met de huid. Mocht u toch een reactie van de huid vaststellen, stop dan meteen met het gebruik van het hulpmiddel en informeer MILLET Innovation hierover.
- Niet gebruiken op een onbeschermde wond.
- Voor personen die aan artritis, diabetes, polyneuropathie, neuropathie van de onderste ledematen of open been lijden: gebruik het product nooit op een wond of een diabetische voetzweer, houd de voet in het oog tijdens het gebruik en vraag uw arts of podoloog om advies.

SAMENSTELLING: 52% silicone, 48% polyamide/elastaan.

MILLET Innovation is niet aansprakelijk bij gebruik dat afwijkt van de aanbevelingen van de fabrikant.



40°C
Wasbaar in de machine op 40°C.

Niet strijken, geen stoom.

Niet chemisch reinigen.


Niet bleken.

Niet drogen in de droogtrommel.

LOT: zie verpakking

epitact
SPORT

PATENTED TECHNOLOGY

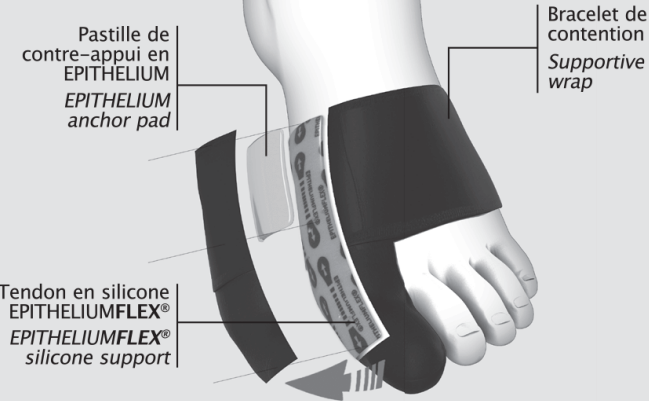

Tendon en silicone
EPITHELIUMFLEX®
EPITHELIUMFLEX®
silicone support

CONCENTRÉ DE TECHNOLOGIE DANS MOINS DE 10g
CONCENTRATED TECHNOLOGY WEIGHING LESS THAN 10g

19374-B • 03/2015

ORTHÈSE HALLUX VALGUS EPITHELIUMFLEX® 02

epitact
SPORT

HALLUX VALGUS BRACE / HALLUX VALGUS SCHIENE / ORTESI PER ALLUCE VALGO / ÓRTESE HALLUX VALGUS / ORTHESE HALLUX VALGUS / ORTESIS HALLUX VALGUS / HALLUX VALGUS ORTESE / HALLUX VALGUS-ORTOS / HALLUX VALGUS-ORTEESI / HALLUX VALGUS-ORTOSE / ΟΡΘΩΤΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ ΒΛΑΙΣΟΥ ΜΕΓΑ ΔΑΚΤΥΛΟΥ



DÉCOUVREZ LA GAMME EPITACT® SPORT: DISCOVER THE EPITACT® SPORT RANGE:



Produit issu de la recherche MILLET Innovation.
Product designed by MILLET Innovation R&D.

www.epitactsport.com

MILLET

Z.A. Champgrand - BP 64 - 26270 Loriol/Drôme - FRANCE
Tel: +33 (0) 820 026 027

www.epitactsport.com