


CORRIGERENDE ORTHESE VOOR 'S NACHTS HALLUX VALGUS "KNOBBEL"



HOE WERKT DE CORRIGERENDE ORTHESE?

De thermovormbare versterking corrigeert de positie van de grote teen. Op die manier wordt de gewrichtspijn 's nachts verlicht.

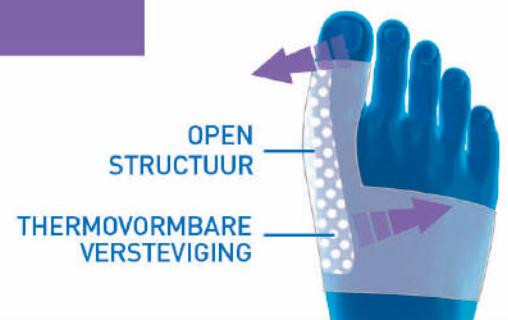

INDICATIES:

Door geregeld de corrigerende EPITACT® orthese voor 's nachts te dragen wordt de hallux valgus gecorrigeerd en groeit hij niet verder. De orthese helpt 's nachts gewrichtspijn en pijn door aanraking te verlichten.

CONTRA-INDICATIES:

De orthese mag niet worden gebruikt indien de grote teen niet meer zijdelings heen en weer kan worden bewogen. Niet gebruiken op een beschadigde huid. Niet gebruiken in geval van diabetes en/of arteritis, zenuwaandoeningen aan de onderste ledematen of zweren.

BIJZONDERE KENMERKEN:

De orthese is thermovormbaar (op maat). De orthese wordt soepel zodra deze volledig is ondergedompeld in warm water. Plaats de spreider (ingesloten) zodra u de orthese heeft aangetrokken. Op die manier neemt de orthese de vorm van uw voet aan en corrigeert daarbij licht uw grote teen. De orthese verhardt en wordt opnieuw stevig in enkele minuten. Op die manier beschikt u over een comfortabele orthese op maat, zodat u

er tijdens het slapen geen last van heeft. Omdat de orthese meermaals thermohervormd kan worden, is deze steeds aanpasbaar.

LEVENSDUUR:

Herbruikbaar gedurende enkele maanden (wasbaar in de machine).

SAMENSTELLING: 52% thermovormbaar plastic, 28% polyamide/elasthaan, 20% siliconen.

De materialen werden beoordeeld op hun biocompatibiliteit volgens ISO-norm 10993-1. Indien er zich alsnog een probleem zou voordoen, stop dan onmiddellijk met het gebruik en breng MILLET Innovation op de hoogte. Het bedrijf MILLET Innovation kan niet aansprakelijk worden gesteld indien het product niet volgens de aanbevelingen van de fabrikant wordt gebruikt.

De referentietaal is het Frans. Initiële CE-markering: 2019.



Machiene wasbaar op 30 °C.



Niet strijken, geen stoom.



Niet stomen.



Niet bleken.



Niet drogen in de droogtrommel.



Zie verpakking.

Product ontwikkeld van MILLET Innovatie - onderzoek.



MILLET Innovation ZA Champgrand
26270 Lorio/Drôme - FRANCE

MILLET
INNOVATION

www.epitact.nl

CE

FLEXIBELE CORRIGERENDE ORTHESE

INDICATIES


De hallux valgus corrigeren, de ontwikkeling ervan beperken en de gewrichtspijnen verlichten.

GEBRUIKSAANWIJZING

- Ga eerst na of de grote teen nog met de hand zijwaarts bewogen kan worden. Als dat niet het geval is, deze correctieve orthese niet gebruiken.
- Gebruik dit product niet 's nachts.
- De orthese kan zowel aan de linker- als de rechervoet gedragen worden.

AANBRENGEN:

- Schuif de middenvoet in de voetband.
- Doe vervolgens het kapje over de grote teen.
- Het Epithelium-vlak™ (a) moet achter de knobbel (b) geplaatst worden. (Zie afbeelding 1)

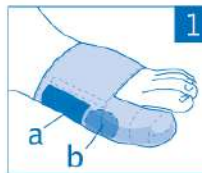

AANPASSEN:

- **Probeer de eerste dag niet de grote teen te corrigeren.**
- Breng gedurende 10 dagen, de grote teen **steeds verder terug naar de juiste stand** door de orthese naar achteren te trekken. (Zie afbeelding 2)



Voor een optimaal resultaat moet de orthese iedere dag gedragen worden.

ONDERHOUD:

- Wasbaar in de wasmachine op 30° C in de bijgeleverde waszak of met de hand wassen (niet schrobben).
- Op natuurlijke wijze laten drogen. Niet strijken.

CONTRA-INDICATIES:

- Onbeweegbare grote teen.
- Niet gebruiken op een onbedekte wond.
- Personen die lijden aan arteritis, diabetes, polyneuropathie, neuropathie van de onderste ledematen of een open been: dit product nooit op een wond gebruiken, de voet in de gaten houden tijdens gebruik en advies vragen aan uw arts of podoloog.

SAMENSTELLING: 58% siliconen, 42% polyamide/elastaanstof.

De materialen werden onderworpen aan alle wettelijk verplichte tests opgelegd door de ISO 10 933-1 norm betreffende producten die in contact komen met de huid. Indien een probleem mocht voordoen, gelieve het gebruik ervan onmiddellijk te stoppen en het bedrijf MILLET Innovation hiervan verwittigen. MILLET Innovation kan niet aansprakelijk worden gesteld indien het gebruikadvies van de fabrikant niet wordt gerespecteerd. De referentietaal is Frans. Initieel CE-label: 2011.



Machine wasbaar op 30°C.



Niet strijken, geen stoom



Niet stomen.



Niet bleken.



Niet drogen in de droogtrommel.



Zie verpakking.

Product ontwikkeld van MILLET Innovatie - onderzoek.



MILLET Innovation ZA Champgrand
26270 Lorio/Drôme - FRANCE

**MILLET
INNOVATION**

www.epitact.nl