

DUIMBRACE NACHT



HOUDT DE DUIM IN EEN RUSTPOSITIE



INDICATIES:

Door de EPITACT® duimbrace nacht tijdens het slapen of rusten te dragen, wordt de gewrichtspijn aan de duimbasis verlicht en de ontwikkeling van duimartrose vertraagd.

VOORZORGEN BIJ GEBRUIK:

In geval van ernstig oedeem: de hand in de gaten houden tijdens gebruik. De orthese uittrekken indien deze te veel spant en de bloedcirculatie belemmert. In geval van twijfel, vraag raad aan uw arts of apotheker. Geen crème of zalf gebruiken vóór u de orthese aantrekt. Niet in de buurt van een vlam of gloeiend voorwerp houden.

EIGENSCHAPPEN:

De EPITACT® orthese houdt de duim in een rustpositie terwijl het gewricht tussen de wijsvinger en de duim wordt geopend. Door de uitlijning van de middenhandsbeentjes worden de krachten op het carpo-metacarpaal gewricht beperkt en wordt de pijn verlicht.

ONTWERP:

Dankzij zijn gepatenteerde ergonomische vorm zit de EPITACT® duimbrace heel comfortabel. U merkt amper dat u hem draagt en kunt rusten zonder pijn.

ADVIES:

Naast de brace voor 's nachts, raden wij u aan om ook de EPITACT® flexibele brace voor overdag te dragen. Deze absorbeert beschadigende micro bewegingen en vermindert zo de pijn.

LEVENSDUUR:

Kan gedurende meerdere maanden worden hergebruikt (niet wasbaar in de machine).

SAMENSTELLING: 57% textiel (Polyamide, Elastaan, Polyurethaan), 43% thermoplastisch elastomeer (TPE).

De materialen werden beoordeeld op hun biocompatibiliteit volgens ISO-norm 10993-1. Indien er zich alsnog een probleem zou voordoen, stop dan onmiddellijk met het gebruik en breng MILLET Innovation op de hoogte. Het bedrijf MILLET Innovation kan niet aansprakelijk worden gesteld indien het product niet volgens de aanbevelingen van de fabrikant wordt gebruikt.

De referentietaal is het Frans. Initiële CE-markering: 2017.



Alleen handwas.



Niet strijken, geen stoom.



Niet stomen.



Niet bleken.



Niet drogen in de droogtrommel.



LOT Zie verpakking.

Product ontwikkeld van MILLET Innovation - onderzoek.



MILLET Innovation ZA Champgrand
26270 Lorial/Drôme - FRANCE



MILLET
INNOVATION

www.epitact.nl