

## SOEPELE POLSBRACE **ACTIVITEIT** **CARP' ACTIV™**



### BIJ DE BEWEGING VAN DE POLS



#### INDICATIES:

Wanneer u last heeft van het Carpaal tunnel syndroom (CPS), spier- en skeletaandoeningen of peesontstekingen aan de pols raden wij u aan om de soepele CARP'ACTIV™ te dragen zodat u uw dagelijkse activiteiten kan blijven uitoefenen.

#### CONTRA-INDICATIES:

De brace mag niet rechtstreeks in contact komen met een huidletsel.

#### VOORZORGEN BIJ GEBRUIK:

Niet aanbevolen bij langdurig typen. Niet in de buurt van een vlam of gloeiend voorwerp houden.

#### BIJZONDERE KENMERKEN:

De brace is ontworpen ter ondersteuning van de polsbewegingen en waarborgt de bewegingsvrijheid van de vingers. CARP'ACTIV™ beperkt de bruske bewegingen van de pols.

#### ERGONOMIE :

De soepele polsbrace werkt ondersteunend en biedt een optimaal comfort dankzij het technische weefsel en de specifieke vorm die de contouren van de hand volgt.

#### LEVENSDUUR:

De orthese heeft een lange levensduur (meerdere maanden) aangezien ze in het meegeleverde netje in de wasmachine gewassen kan worden.

#### SAMENSTELLING: 100% polyamide/elastaanweefsel.

De materialen werden beoordeeld op hun biocompatibiliteit volgens ISO-norm 10993-1. Indien er zich alsnog een probleem zou voordoen, stop dan onmiddellijk met het gebruik en breng MILLET Innovation op de hoogte. Het bedrijf MILLET Innovation kan niet aansprakelijk worden gesteld indien het product niet volgens de aanbevelingen van de fabrikant wordt gebruikt. De referentietaal is het Frans. Initiële CE-markering: 2018.



Wasbaar in de wasmachine à 30°C  
Geen bleekmiddel gebruiken.



Niet strijken of stomen.  
Niet in de droogkast.



Geen chemische reiniging.



Zie verpakking.

Product ontwikkeld door MILLET Innovation.



MILLET Innovation ZA Champgrand  
26270 Lorio/Drôme - FRANKRIJK



MILLET  
INNOVATION

www.epitact.nl

## IMMOBILISERENDE POLSBRACE CARP'IMMO™

### IMMOBILISEERT EN ONTLAST DE POLS



**KLITTENBAND**  
> Juiste afstelling van de orthese rond de pols.

**ZACHT EN FIJN WEEFSEL**  
> Optimaal comfort.



**ANATOMISCHE VERSTEVINGEN**  
> Immobilisering van de pols in neutrale positie.

#### INDICATIES:

Wanneer u last heeft van het Carpaal tunnel syndroom (CPS), spier- en skeletaandoeningen of peesontstekingen aan de pols raden wij u de immobiliserende CARP'IMMO™ rustbrace voor 's nachts (of wanneer u uw hand niet gebruikt) aan.

#### CONTRA-INDICATIES:

De brace mag niet rechtstreeks in contact komen met een huidletsel.

#### VOORZORGEN BIJ GEBRUIK:

Lees aandachtig de informatie in de bijsluiter voordat u de enkelbandage gebruikt. In geval van twijfel, vraag raad aan uw arts, apotheker of medisch personeel. Dit medisch hulpmiddel is een gezondheidsproduct dat aan de Europese wetgeving is onderworpen en van het CE-label is voorzien.

#### BIJZONDERE KENMERKEN:

De CARP'IMMO™ brace is uiterst licht en past zich aan uw pols aan. Dankzij zijn semi-flexibele anatomische verstevigingen wordt uw pols in een comfortabele en neutrale positie gehouden.

#### ERGONOMIE:

De immobiliserende CARP'IMMO™ brace biedt u een optimaal comfort dankzij de verstevigingen die zich perfect aan de vorm van uw hand aanpassen. De brace is zo licht en fijn dat u er tijdens het dragen geen last van heeft, zelfs 's nachts. De brace heeft een wijde opening zodat hij vlot over de hand kan worden geschoven. Dankzij de fixeeriem sluit de brace rond de hele pols even goed aan.

#### ONDERHOUD:

Met de hand wassen op 30°C, met een niet-agressieve zeep en zonder reinigings- of bleekmiddel. Goed spoelen. Met de hand uitwringen. Niet blootstellen aan een directe warmtebron (verwarmingstoestel, zonlicht). Geen vlekkenverwijderaars gebruiken.

**SAMENSTELLING:** 59 % textiel (Polyamide, Elastaan, Polyurethaan), 41 % TPE thermovorbare kunststof.

De materialen werden beoordeeld op hun biocompatibiliteit volgens ISO-norm 10993-1. Indien er zich alsnog een probleem zou voordoen, stop dan onmiddellijk met het gebruik en breng MILLET Innovation op de hoogte. Het bedrijf MILLET Innovation kan niet aansprakelijk worden gesteld indien het product niet volgens de aanbevelingen van de fabrikant wordt gebruikt. De referentietaal is het Frans. Initiële CE-markering: 2018.



Wasbaar met de hand.



Niet strijken of stomen.



Geen chemische reiniging.



Geen bleekmiddel gebruiken.



Niet in de droogkast.



Zie verpakking.



MILLET Innovation ZA Champgrand  
26270 Lorial/Drôme - FRANKRIJ

Product ontwikkeld door MILLET Innovation.

**MILLET  
INNOVATION**

[www.epitact.nl](http://www.epitact.nl)