

DUIMBRACE NACHT



HOUDT DE DUIM IN EEN RUSTPOSITIE



INDICATIES:

Door de EPITACT® duimbrace nacht tijdens het slapen of rusten te dragen, wordt de gewrichtspijn aan de duimbasis verlicht en de ontwikkeling van duimartrose vertraagd.

VOORZORGEN BIJ GEBRUIK:

In geval van ernstig oedeem: de hand in de gaten houden tijdens gebruik. De orthese uittrekken indien deze te veel spant en de bloedcirculatie belemmert. In geval van twijfel, vraag raad aan uw arts of apotheker. Geen crème of zalf gebruiken vóór u de orthese aantrekt. Niet in de buurt van een vlam of gloeiend voorwerp houden.

EIGENSCHAPPEN:

De EPITACT® orthese houdt de duim in een rustpositie terwijl het gewricht tussen de wijsvinger en de duim wordt geopend. Door de uitlijning van de middenhandsbeentjes worden de krachten op het carpo-metacarpaal gewricht beperkt en wordt de pijn verlicht.

ONTWERP:

Dankzij zijn gepatenteerde ergonomische vorm zit de EPITACT® duimbrace heel comfortabel. U merkt amper dat u hem draagt en kunt rusten zonder pijn.

ADVIES:

Naast de brace voor 's nachts, raden wij u aan om ook de EPITACT® flexibele brace voor overdag te dragen. Deze absorbeert beschadigende micro bewegingen en vermindert zo de pijn.

LEVENSDUUR:

Kan gedurende meerdere maanden worden hergebruikt (niet wasbaar in de machine).

SAMENSTELLING: 57% textiel (Polyamide, Elastaan, Polyurethaan), 43% thermoplastisch elastomeer (TPE).

De materialen werden beoordeeld op hun biocompatibiliteit volgens ISO-norm 10993-1. Indien er zich alsnog een probleem zou voordoen, stop dan onmiddellijk met het gebruik en breng MILLET Innovation op de hoogte. Het bedrijf MILLET Innovation kan niet aansprakelijk worden gesteld indien het product niet volgens de aanbevelingen van de fabrikant wordt gebruikt.

De referentietaal is het Frans. Initiële CE-markering: 2017.



Alleen handwas.



Niet strijken, geen stoom.



Niet stomen.



Niet bleken.



Niet drogen in de droogtrommel.



LOT Zie verpakking.

Product ontwikkeld van MILLET Innovation - onderzoek.



MILLET Innovation ZA Champgrand
26270 Lorial/Drôme - FRANCE




MILLET
INNOVATION

www.epitact.nl

FLEXIBELE DUIMBRACE

VERLICHT PIJN AAN DE DUIM

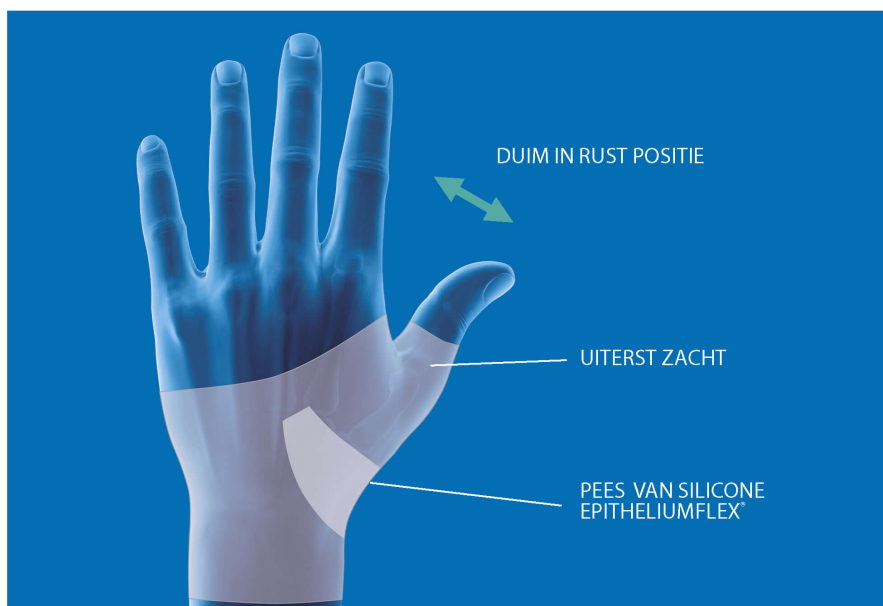

WERKING VAN DE FLEXIBELE DUIMBRACE, BIJ GEBRUIK OVERDAG

De brace houdt warmte vast: De EPITACT® brace heeft een pijnstillend effect doordat de brace de plaatselijke warmte vasthoudt dankzij de specifieke eigenschappen van de stof en de EPITHELIUMFLEX® silicone pees.

INDICATIES:

Deze flexibele duimbrace is ontwikkeld om gewrichtspijn als gevolg van duimartrose of osteoartritis aan de duim te verlichten. De brace zorgt ervoor dat u uw duim in alle vrijheid kunt gebruiken en beperkt tegelijkertijd beschadigende microbewegingen.

CONTRA-INDICATIES:

Niet gebruiken op een huidletsel.

VOORZORGEN BIJ GEBRUIK:

In geval van ernstig oedeem: de hand in de gaten houden tijdens gebruik. De orthese uittrekken indien deze te veel spant en de bloedcirculatie belemmert.

In geval van twijfel, vraag raad aan uw arts of apotheker. Geen crème of zalf gebruiken vóór u de orthese aantrekt. Niet in de buurt van een vlam of gloeiend voorwerp houden.

EIGENSCHAPPEN:

De brace beperkt de beschadigende microbewegingen (beweging van de handen tijdens het wandelen, spreken,...) door de duim in rustpositie te houden. De brace houdt het gewricht warm en verlicht de gewrichtspijn aan de duimbasis dankzij zijn schokabsorberende werking.

ONTWERP:

De brace is flexibel, dun en discreet, waardoor u uw volledige hand kunt blijven gebruiken tijdens het rijden, schrijven, bellen, enz. U kunt gewoon uw horloge of juwelen blijven dragen.

ADVIES:

De flexibele EPITACT® brace kan worden gebruikt naast de EPITACT® verstevigde brace die beter geschikt is voor gebruik 's nachts.

LEVENSDUUR:

Herbruikbaar gedurende enkele maanden (wasbaar in de machine).

SAMENSTELLING: 86% polyamide/elastaanstof, 14% siliconen.

De materialen werden beoordeeld op hun biocompatibiliteit volgens ISO-norm 10993-1. Indien er zich alsnog een probleem zou voordoen, stop dan onmiddellijk met het gebruik en breng MILLET Innovation op de hoogte. Het bedrijf MILLET Innovation kan niet aansprakelijk worden gesteld indien het product niet volgens de aanbevelingen van de fabrikant wordt gebruikt.


De referentietaal is het Frans. Initiële CE-markering: 2013.



Alleen handwas.



Niet strijken, geen stoom.

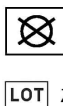

Niet stomen.



Niet drogen in de droogtrommel.



LOT Zie verpakking.

Product ontwikkeld van MILLET Innovatie - onderzoek.



MILLET Innovation ZA Champgrand
26270 Loriol/Drôme - FRANCE



MILLET
INNOVATION

www.epitact.nl