

NEDERLANDS

BESCHERMERS TEGEN BLAUWE NAGELS

EPITHELIUMTACT 02

INDICATIE:

De EPITHELIUMTACT 02 beschermers tegen blauwe nagels bestaan uit een uiterst sterke, 1 mm dikke siliconengel, waarvan de visco-elastische eigenschappen deze van de huid benaderen. De beschermers verdelen de druk en absorberen de microschokken door de energie in de gel te verspreiden. Zo wordt de vorming van blauwe nagels of blaren onmogelijk gemaakt. Ze verlichten ook de pijn, waardoor het mogelijk wordt om op volle kracht te blijven sporten.

CONTRA-INDICATIES:

- Niet gebruiken op een onbeschermd wond.
- Voor personen die aan artritis, diabetes, polyneuropathie, neuropathie van de onderste ledematen of open been lijden: gebruik het product nooit op een wond of een diabetische voetzweer, houd de voet in het oog tijdens het gebruik en vraag uw arts of podoloog om advies.

GEBRUIKSAANWIJZING:

Deze beschermers moeten **preventief** worden gebruikt. Ze zijn ook perfect geschikt wanneer de blauwe nagel gevormd is.

De beschermers moeten worden gebruikt op een schone en droge huid.

- Om de beschermers gemakkelijk aan te brengen: plaats de beschermers binnenstebuiten tegen het uiteinde van de teen en rol de beschermers vervolgens geleidelijk af.
- Maak de beschermers niet korter, want dat is nadelig voor de stevigheid.
- Verwijder de beschermers elke avond om maceratie te voorkomen.
- Plaats de beschermers in het daartoe voorziene gemetalliseerde zakje tot het volgende gebruik.

ONDERHOUD:

De pleisters kunnen met water en zeep worden schoongemaakt. Niet schrobben en vanzelf laten drogen.


SAMENSTELLING: 82% silicone, 18% polyamide/elasthaan.

De materialen werden onderworpen aan alle wettelijk verplichte tests opgelegd door de ISO 10 933-1 norm betreffende producten die in contact komen met de huid. Indien een probleem mocht voordoen, gelieve het gebruik ervan onmiddellijk te stoppen en het bedrijf MILLET Innovation hiervan verwittigen.

MILLET Innovation is niet aansprakelijk bij gebruik dat afwijkt van de aanbevelingen van de fabrikant. De referentietaal is Frans. Initieel CE-label: 2014.



PREVENTIVE PROTECTORS

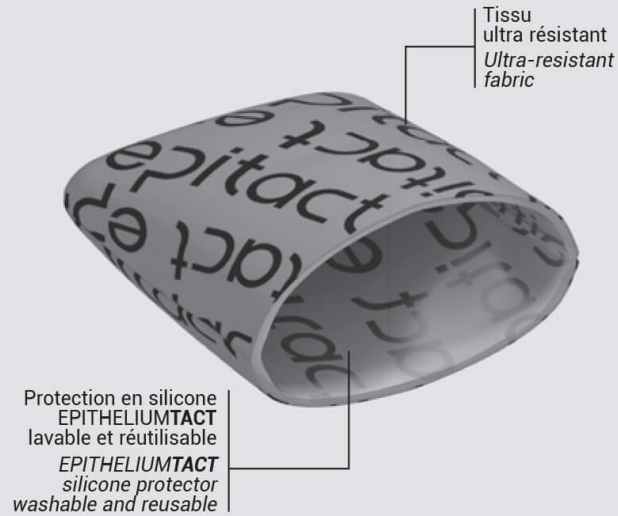

ABSORPTION DES MICRO-CHOC ET DES PRESSIONS
ABSORPTION OF MICRO-SHOCKS AND PRESSURE

DÉCOUVREZ
LA GAMME EPITACT® SPORT

DISCOVER
THE EPITACT® SPORT RANGE

www.epitactsport.com

PROTECTIONS ONGLES BLEUS EPITHELIUMTACT 02



TOENAIL PROTECTORS / BLAUE-NÄGEL-SCHUTZKAPPEN / PROTEZIONE PER UNGHIE LIVIDE / PROTEÇÕES UNHAS NEGRAS / BESCHERMERS TEGEN BLAUWE NAGELS / PROTECCIONES UÑAS MORADAS / TÅBESKYTTELSE MOD BLÅ NEGLE / BLÅNAGELSSKYDD / SINISTEN KYNSIEN SUOJAT / BESKYTTELSESPASTER MOT BLÅ NEGLER / ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΜΕΛΑΝΩΝ ΝΥΧΙΩΝ



19370-C-09/2017

MILLET
INNOVATION

Produit issu de la recherche MILLET Innovation.
Product designed by MILLET Innovation R&D.

MILLET Innovation - ZA Champgrand
BP64 - 26270 Loriol/Drôme - FRANCE

contact@epitact.com
www.epitactsport.com