

NEDERLANDS

ENKELBESCHERMERS EPITHELIUMTACT 04

epitact®
SPORT

INDICATIE:

De EPITHELIUMTACT 04 enkelbeschermers bestaan uit een 2 mm dikke zelfklevende siliconengel, waarvan de visco-elastische eigenschappen deze van de huid nabederen. De beschermers worden rechtstreeks op de huid van de enkels aangebracht, verdelen de druk en absorberen de wrijvingen door de energie in de gel te verspreiden. Zo wordt verhitting onmogelijk gemaakt. Ze verlichten ook de pijn, waardoor het mogelijk wordt om op volle kracht te blijven sporten. Het contact met de huid is heel aangenaam. De pleister kan pijnloos worden verwijderd, ook op behaarde zones.

CONTRA-INDICATIES:

- Niet gebruiken op een onbeschermde wond.
- Voor personen die aan artritis, diabetes, polyneuropathie, neuropathie van de onderste ledematen of open been lijden: gebruik het product nooit op een wond of een diabetische voetzweer, houd de voet in het oog tijdens het gebruik en vraag uw arts of podoloog om advies.

GBRUIKSAANWIJZING:

- De EPITHELIUMTACT 04 beschermers werden speciaal ontworpen om de gevoelige zones (enkels, bootvormige beenpjes) perfect te bedekken.
- Verwijder het transparante beschermiaagje (opgelet: het weefsel niet losmaken)
 - Breng de beschermer rechtstreeks op de huid van de te beschermen zone aan. U kunt de beschermer onbeperkt verwijderen en opnieuw aanbrengen.
 - Trek bij voorkeur een sok aan over de beschermer.
 - Plaats de beschermer terug in het daartoe voorziene etui en stop deze in het gemetalliseerde zakje tot het volgende gebruik.

ONDERHOUD:

- De beschermer kunnen met water en zeep worden schoongemaakt. Niet schrobben en vanzelf laten drogen.
- De beschermers kunnen minstens dertig maal gewassen worden zonder wijziging van de eigenschappen.

SAMENSTELLING: 91% silicone, 9% polyamide/elastaan.

De materialen werden onderworpen aan alle wettelijk verplichte tests opgelegd door de ISO 10 933-1 norm betreffende producten die in contact komen met de huid. Indien een probleem mocht voordoen, gelieve het gebruik ervan onmiddellijk te stoppen en het bedrijf MILLET Innovation hiervan verwittigen.

MILLET Innovation is niet aansprakelijk bij gebruik dat afwijkt van de aanbevelingen van de fabrikant. De referentienummer is Frans. Initieel CE-label: 2014.



Alleen handwas.



Niet strijken,
geen stoom.



Niet drogen in de
droogtrommel.



Niet bleken.




Geen droogkuis.



LOT

Zie verpakking.

PREVENTIVE PROTECTORS

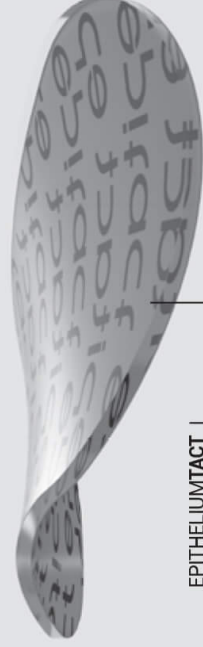

EPITHELIUMTACT
silicone protector
washable and reusable
EPITHELIUMTACT
silicone protector
washable and reusable

19371-C - 05/2018

RÉPARTITION DES PRESSIONS ET DES FROTTEMENTS DISTRIBUTION OF PRESSURE AND FRICTION

DÉCOUVREZ
LA GAMME EPITACT® SPORT
DISCOVER
THE EPITACT® SPORT RANGE

www.epitactsport.com

MILLET
INNOVATION

Produit issu de la recherche MILLET Innovation.
Product designed by MILLET Innovation R&D.

MILLET Innovation - ZA Champgrand
BP64 - 26270 Loriol/Drôme - FRANCE

contact@epitact.com
www.epitactsport.com

PROTECTIONS MALLEOLES EPITHELIUMTACT 04

MALLEOLAR PROTECTORS / KNÖCHELSCHUTZ / PROTEZIONI PER MAL-
LEOLI / PROTEÇÕES PARA OS MALÉOLOS / ENKELBESCHERMERS / PRO-
TECCIONES PARA MALÉOLOS / BESKYTTTELSEER TIL ANKELKNUDER /
FOTKNÖLSSKYDD / KEHRÄSLUUN SUOJAT / ANKELPLASTER / ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ
ΑΣΤΡΑΓΑΛΩΝ

